

NÁVOD NA ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MIKROBIÁLNÍ OBRAZ POŠEVNÍ (MOP)

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Zkratka | MOP |
| 2. Biologický materiál | Vaginální sekret z poševní klenby |
| 3. Označení podložního skla | Sklo je označeno písmeny a číslicí v matové části skla
Každý lékař má přidělenou unicitní značku |
| 4. Postup při odběru | Pomocí sterilního tampónu setřeme sekret ze zadní klenby poševní, tampón necháme sekretem chvíli nasáknout, sekret rozetřeme na podložní sklo |
| 5. Uchování do transportu | MOP necháme zaschnout při pokojové teplotě, po té uložíme do transportní krabičky a rovněž uchováváme při pokojové teplotě |
| 6. Transport služby) | V transportní krabičce pomocí spojky (transportní |
| 7. Analytická metoda | Barvení Giemsou-Romanovski |
| 8. Výsledky MOP | Klasifikace I – VI dle Jírovce, Petera a Málka |